

# EB1008 BUSCAPUNTOS MOD. POINT-MATE CE0197



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

*Esta unidad ha sido diseñada exclusivamente para uso profesional, por favor lea detenidamente este manual de instrucciones para asegurar un uso adecuado.*

*Distribuidor: NOVASAN S.A. C/. Churruca 18 28004 Madrid  
www.novasan.com Teléfonos: 902 10 68 68 / (34) 91 591 98 14*

INTRODUCCIÓN.- Es adecuado y fácil de usar manualmente como localizador en acupuntura.

#### USO

1. Es importante saber que cualquier parte del cuerpo puede ser inducido a producir una señal punto de localización, dependiendo del grado de presión utilizado durante la localización. Es importante para localizar los puntos de acupuntura usar con el mínimo presión posible en la superficie de la piel. Además, el movimiento de búsqueda debe ser suave siempre manteniendo constante la misma presión de manera uniforme hasta encontrar el punto adecuado.
2. Listo para usar. Insertar el enchufe de 3.5 mm dentro del punto localizador. Mantener por el polo de tierra (toma de tierra). Buscar por los puntos y ajustar el dial de sensibilidad como sea necesario.
3. Ajuste de sensibilidad. El punto de detección de sensibilidad es ajustable. El "sen" saliente se utiliza para incrementar (ajuste en sentido de las agujas del reloj) o disminuir (reloj contador) la sensibilidad cuando se usa en pieles de diferentes condiciones (piel seca o piel grasa).
4. Accesorio manual de toma de tierra. El paciente debe sujetarlo de manera que se cree un completo circuito eléctrico. Éste accesorio se coloca y saca fácilmente de la unidad.

#### COMO USAR LA UNIDAD

1. Insertar una pila de 9 voltios en el compartimento de pilas los polos positivo y negativo de la pila deben estar correctamente situados. Una Duracell de 9 voltios u otra pila alcalina similar se recomienda para su uso adecuado.
2. colocar el examinador para uso en oreja o los diferentes puntos del cuerpo. Puede ser utilizado en puntos concretos del cuerpo o en áreas (zonas) más grandes.
3. para uso personal, sujete el polo toma de tierra para crear un completo circuito eléctrico, luego coloque el buscapuntos en la oreja o en diferentes puntos del cuerpo, par encontrar el adecuado.
4. presione cada punto armoniosamente, el buscapuntos utiliza un mecanismo especial para mantener una presión constante durante la localización. Los respectivos puntos de acupuntura, al ser localizados emiten un sonido continuo que se oyen como un zumbido y al mismo tiempo una luz led parpadea continuamente.
5. para localizar los puntos en los pacientes, el polo toma de tierra debe estar unido al enchufe de la parte baja de la unidad. El paciente debe sujetar el polo tierra para completar el circuito eléctrico el cual activa las funciones de detección. Luego seguir los pasos del 5 al 9.
6. apague la unidad después e usarla. Quite la pila de la unidad cuando no vaya a ser utilizado en mucho tiempo.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamaño: 100 x 61 x 35 mm

Peso: 65 gr. (solo la unidad), 200 gr. (el set completo)

Potencia: pila de 9v.

Accesorios: un buscapuntos con polo de toma tierra.  
un manual de instrucciones.  
una pila de 9v.

## PRECAUCIONES

No lo use para:

- pacientes con problemas cardíacos (consultar un médico)
- mujeres embarazadas (consultar médico)
- cerca o en áreas cercanas al corazón
- directamente o cerca de una herida abierta o reciente
- sobre la piel arañada
- sobre quemaduras.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Guardar en lugar seco, fuera del polvo y la contaminación
- Mantenerlo en una temperatura de : 16°C a 40 °C
- No mojarlo ni exponerlo a temperaturas o humedad extremas
- No utilizarlo si la unidad presenta disfunciones.



**MANUFACTURER:** Tens Plus Industrial Company, C11.6/F, Wing Hing Ind Bldg. 14  
Hing Yip St. Kwun Tong, Kowloon Hong Kong

**EC REPRESENTATIVE:** Blair Prospect Ltd, Blair Atholl Sawmill Yard, Blair Atholl  
Perthshire, Ph16 5<sup>TH</sup> Scotland, United Kingdom

**IMPORTER AND DISTRIBUTOR:** Novasan, S.A., C/Churruca,18 Bajo (28004) Madrid  
Spain

