

MC1094
MASAJEADOR DE CABEZA DOBLE
(LC-2002K)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Esta unidad ha sido diseñada exclusivamente para uso profesional, por favor lea detenidamente este manual de instrucciones para asegurar un uso adecuado.

*Distribuidor: NOVASAN S.A. C/. Churruca 18 28004 Madrid
www.novasan.com Teléfonos: 902 10 68 68 / (34) 91 591 98 14*

I. Nombre de las partes.



II. Características del producto:

- El diseño de su contorno individual es novedoso.
- La potencia de aplicación y el masaje profundo de su doble cabezal resultan más efectivas para un mayor confort y una renovada vitalidad.
- El golpeo producido por sus dos cabezales mientras trabajan son más adecuados para masajear el cuerpo humano.
- El diseño especial con forma de mano, transfiere el peso al martillo, y por consiguiente, todo lo que hay que hacer es sujetarlo suavemente para que los martillos corran y se deslicen por su peso para conseguir efectos ideales sin ejercer una presión extrema.
- El masaje con dos velocidades, fuerte y suave, cubre las diferentes necesidades.
- Con su diseño de ingeniería, este aparato manual, puede masajear cualquier parte del cuerpo fácilmente.

III. Utilización

1. Por favor, asegúrese que el botón masajeador esta apagado (OFF) y luego inserte el enchufe en el compartimiento (POWER).
2. Masaje. Pulse el botón de selección de potencia 1 (Baja velocidad) o 2 (alta velocidad) para ajustar la potencia de masaje.
3. Coloque el interruptor de potencia en la posición OFF (0) para el masaje y luego desconecte el enchufe de potencia sacándolo del aparato.

IV. Características y funciones:

- Calienta tu cuerpo y previene daños si se utiliza antes del ejercicio físico.
- Ayuda a la circulación sanguínea.
- Alivio de tensión muscular y alivio de la presión.
- El martilleo masajeador actúa profundamente en la musculatura para relajar el músculo tensionado, ejercitar los músculos y eliminar la presión dejándolos relajados.
- Es muy útil para aliviar dolores y desentumecer y proporcionar flexibilidad a la musculatura blanda.
- Es muy útil para el agarrotamiento muscular.
- Ayuda al músculo a perder la tensión y elimina la fatiga si se utiliza después de hacer deporte.

V. Precauciones.

- ❖ Utilizar el masajeador sólo de acuerdo a las funciones descritas en este manual.
- ❖ Compruebe que el voltaje es el adecuado.
- ❖ Después de usarlo y antes de limpiar el masajeador, colóquelo en la posición (0) y luego desconecte el enchufe de potencia.
- ❖ No deje el masajeador encendido solo, especialmente si hay niños y, por favor, téngalo desenchufado si no está utilizándolo.
- ❖ No se siente encima o cubra el masajeador.
- ❖ No lo use mientras se baña.
- ❖ No sumerja el masajeador en agua accidentalmente, desenchúfelo inmediatamente y no lo saque del agua inmediatamente.
- ❖ No utilice el masajeador si está con sueño.
- ❖ No lo utilice inmediatamente después de levantarse, el masajeador puede producirle más somnolencia o retrasarle (quitarle) sueño si lo utiliza antes de acostarse.
- ❖ No utilice el masajeador en zonas poco ventiladas, por ejemplo debajo de la almohada o las sábanas porque puede producir fuego, shock eléctrico u otros daños.
- ❖ No lo utilice en lugares donde haya oxígeno embotellado o aerosoles.
- ❖ No lo utilice alrededor de los ojos ni en partes hipersensibles.
- ❖ No lo utilice en pieles sensibles.
- ❖ No lo utilice en la cabeza, rodillas, tobillos o pecho durante mucho tiempo para evitar daños secundarios.
- ❖ Los niños y personas discapacitados no están autorizados a utilizarlos.
- ❖ Si el enchufe estuviera estropeado o nota alguna anomalía, no lo cambie usted mismo, no siga utilizándolo, no lo desarme ni repare, contacte con el proveedor lo antes posible.
- ❖ No inserte otros objetos en el masajeador.
- ❖ Se recomienda que su aplicación no exceda de 15 minutos. Pasado este tiempo, puede acortar su vida activa o estropearse. Si se recalienta debe apagarlo y dejar que se enfríe antes de usarlo de nuevo.
- ❖ Tire siempre del enchufe para sacarlo y no del cable del aparato, puede usarse 1 hora después de la comida (cena). Beba 150 cc de agua antes del masaje. Beba 250 cc de agua después del masaje.
- ❖ Sentirá una experiencia agradable y placentera al utilizar este producto. Si siente alguna molestia o daño, por favor, deje de utilizarlo y consulte con un médico.

Siga siempre las instrucciones de un médico para su uso si:

1. Si está embarazada, si ha abortado recientemente o tiene inflamaciones postoperatorias.
2. Enfermedades crónicas, problemas de corazón, roturas, luxaciones y gente con el cuerpo en condiciones anormales.
3. Gente con cardenales, herpes en la piel del pie.

Nota:

- Debe comenzar el masaje a la velocidad baja y gradualmente aumentar la intensidad.
- Antes de utilizarlo de nuevo, deje el aparato enfriándose por lo menos 20 minutos para evitar recalentamiento

- Si su piel siente cualquier molestia durante el tratamiento debe dejar de utilizarlo inmediatamente.

VI. Mantenimiento y almacenaje:

- Recuerde desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
- No utilice para limpiar el aparato benceno o ningún diluyente.
- Limpie todas las partes del masajeador con un paño seco y suave. No utilice un paño mojado.
- Este producto ha sido diseñado y fabricado por expertos y no requiere lubricación, mantenimiento ni reparación.
- No bloquee ninguna parte del masajeador ni lo ponga en superficies blandas como una cama o sofá, manténgalo limpio de polvo y de sustancias que se adhieran (pelo).
- Guarda el masajeador en un lugar seco y a prueba de fuego.
- No almacenar en un lugar caliente o cerca del fuego o calefacción.
- No exponerlo a la luz solar durante mucho tiempo.

Nota: cualquier reparación debe efectuarse por personal de mantenimiento autorizado o por nuestra compañía.

VII. Especificaciones:

Nombre del producto: MASAJEADOR DE CABEZA DOLE

Modelo: LC-2002K

Voltaje: 120 VAC/60 Hz 220V-240 VAC/50-60 HZ

Consumo: 20 W

Fabricante:

Wenzhou Lichang Body-Training Equipment Co.,Ltd.
Songqiao Industry Zone, Pingyang, Wenzhou City.
Zhejiang Province, China

Importador y Distribuidor en España:

NOVASAN, S.A.
C/ CHURRUCA, 18 BAJO (28004) MADRID – SPAIN
Tel: 00 34 91522 48 17 Fax: 00 34 91 523 18 08
www.novasan.com e-mail: novasan@novasan.com