

## VS4013 VENTOSAS DE PLASTICO MAGNÉTICO (8UD)




*Estas ventosas están diseñadas sólo para el uso de personas cualificadas. Usted deberá consultar con su terapeuta antes de usar el producto.*

### ESTRUCTURA DE LA VENTOSA

Entre las partes de la ventosa, cabe destacar que la magneto-aguja potente está fabricada con aleación de tierra rara y magnetita, con un campo magnético en la superficie  $\geq 2500$  gauss (250mT). Bajo la acción magnetomotriz, los rayos magnéticos pueden penetrar hasta 6-9 cm de profundidad en el cuerpo humano, equivalente a la que se consigue con las agujas convencionales, eso no es todo, gracias a la presión negativa apretando y soltando la cámara de presión, la ventosa se fija en el cuerpo sin necesidad de insertar la aguja.

En la misma sesión, se pueden poner varias e incluso decenas de ventosas, de tal forma que cumple la función de la acupuntura tradicional y además la de estimulación de los meridianos a través de múltiples puntos.

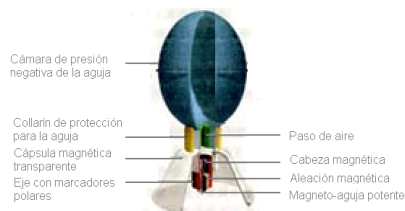

### CÓMO LOCALIZAR LOS PUNTOS EXACTOS

Muchas personas tiene la preocupación de no poder encontrar los puntos exactos, en realidad, no es necesario ser tan estricto como en la acupuntura convencional en la cual la exigencia viene justificada por el posible daño en los huesos y órganos internos. En el método de ventosas no hace falta insertar las agujas dentro de los tejidos y además los meridianos tienen la forma de cinta, así que surte efecto siempre que la magneto-aguja potente, esté dentro de un radio de 3 cm. Existe otra manera de localizar los puntos efectivos, puede utilizar un gráfico para la localización de puntos o buscar los puntos presionando con el dedo, hasta encontrar el punto efectivo. Se tratan de los mismos puntos efectivos en la acupuntura convencional.

Es importante colocar las magneto-agujas potentes de las ventosas alternando los polos N (color azul) y S (color rojo); cuando se aumenta el número de las magneto-agujas potentes, se forma una malla tejida de líneas magnéticas que mejora los resultados.

### GUIA DE USO

1. Aplicar cierta cantidad de gel sobre los puntos a tratar; apretar la cámara de presión con los dedos pulgar, índice y medio con el fin de expulsar todo el aire, colocar la ventosa sobre el punto haciendo que el borde de la cápsula magnética esté en contacto totalmente con la superficie de la piel. Soltar los dedos para finalizar la operación de colocación. Al terminar la sesión, se aprieta la cámara retirando suavemente la ventosa. Si se procediera de forma forzosa, podría lesionar la piel.
2. En cada punto, la estimulación dura unos 15 minutos. Se realiza 1-2 sesiones diarias, 10 días forman un ciclo. Desde el segundo ciclo se puede ir prolongando el tiempo de cada sesión.

3. Para colocar las ventosas en los pies, es preciso lavarlos con agua de sal templada antes de iniciar la sesión.
4. Cada vez que se termina de usar, hay que esterilizar las ventosas antes de guardarlas para la siguiente sesión.
5. Para activar la circulación benigna, es recomendable beber agua, y si es posible, agua magnetizada.
6. Se elige el tamaño de las ventosas según la zona, es decir, las ventosas de tamaño grande se usan para las zonas de gran superficie y ventosas de tamaño pequeño para las zonas de dimensión pequeña.

## MÉTODOS DE TRATAMIENTO

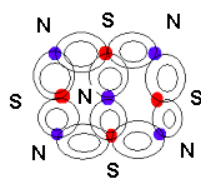


Ilustración del método 1

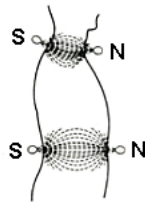


Ilustración del método 2

### Método 1: Conexión bipolar sobre la misma superficie (al mismo nivel)

Colocar las ventosas N y S en un lado del cuerpo al mismo nivel y separadas con cierto espacio, de tal manera que cuando se conectan los dos polos mediante las líneas magnéticas, se comuniquen los meridianos. Así es como se corrige el equilibrio entre el Yin y el Yang.

### Método 2: Conexión bipolar transfixiante a distinto nivel

Colocar las magneto-agujas potentes con polo N y S a los dos lados del cuerpo formando un campo magnético perpendicular respecto a la piel, como ilustra el dibujo; ahora que los líquidos orgánicos (humor), los órganos internos y los meridianos se encuentran totalmente dentro del campo magnético, se establece su equilibrio

### Método 3: Acupuntura monopolar

Este método consiste en el empleo de una sola ventosa, N o S, colocada en el punto efectivo o en una zona determinada.

### Método 4: Acupuntura puntual

También se denomina presión puntual. En éste método se sujeta con los dedos la ventosa por el collarín de protección y se presiona el punto con la magneto-aguja potente. Es indicado para las zonas donde hay dificultad para tratar, como por ejemplo: la cabeza, los dedos de la mano, del pie, en donde la cápsula magnética sirve de tope. De la misma manera, en otras partes del cuerpo también se puede emplear este método de "magnetopuntura". En cada punto se presiona por lo menos 36 veces, o durante 3-5 minutos en cada sesión.

### Método 5: Acupuntura deslizante

Se procede a aplicar gel en la zona afectada y su alrededor, apretar con suavidad la cámara para expulsar una parte del aire consiguiendo que la fuerza de adhesión sea lo justo para luego deslizar la ventosa lentamente.

### Método 6: Acupuntura ligera

Se aprieta ligeramente la cámara de ventosa expulsando cierta cantidad de aire para minimizar la aspiración (adhesión). El método es indicado para las zonas donde la piel es delicada, como por ejemplo, en la cara.

**Método 7: Acupuntura ligera a picoteos**

Colocar la ventosa en el punto efectivo (método 6 de acupuntura ligera), levantarla, tocar el punto y después repetir la misma operación unas 15-30 veces.